

	122S	122CA	TR22T	TR22R	TR22L	140S	140CA	FC10N	FC25B	FC32B
Τομή αποστήματος	X	X				X	X			
Αποκάλυψη εγκλείστου - απομάκρυνση υγρών με τομή	X	X								
Τομή περίξ της μύλης / θυλάκιον του δοντιού	X	X								
Αιμόσταση						X	X	X	X	X
Αποκάλυψη σπασμένου δοντιού - Επιμήκυνση Στεφαναίας ραφής	X	X				X	X			
Απομάκρυνση υπερτροφίας ούλων			X	X	X		X			
Διαπλάτυνση οδοντική σχισμής	X	X				X	X	X		
Διαμόρφωση ακρολοφίας νοδής περιοχής			X			X	X			
Αποκάλυψη εγκλείστου	X	X			X					
Χαλινεκτομή	X	X	X			X	X			
Απομάκρυνση υπερτροφίας ούλων	X	X	X	X	X	X	X		X	
Επιμήκυνση Στεφαναίας ραφής για εφαρμογή ελάσματος	X	X				X	X			
Απόθεση ούλων για πιο καθαρά αποτυπώματα						X	X	X		
Χαλινεκτομή	X	X				X	X			
Ανοιγμα κρυμνού	X	X								
Ουλοπλαστική - Ουλεκτομή	X	X	X	X		X	X			

Η κατάλληλη ρύθμιση Ενταση αιμόστασης κ κοπής για κάθε εργαλείο είναι σε έντυπο servotome satelec -